

ユニット型陰圧隔離室

# AeroGuardian

エアロガーディアン




工業所有権出願中

結核症が疑われる場合など、空気感染の恐れのある患者さんを一般の病室内で簡単に緊急隔離できるユニットです。

対象疾患： 結核・水痘・麻疹・その他の感染症


- CDC（米国疾病管理センター）準拠の安全設計
- 簡単に組み立てられます
- 折りたたみ式で収納・移動も簡単

快適環境をクリエイトする

 三機工業株式会社


<http://www.sanki.co.jp/amenity/>

## ■タイプA (内部治療タイプ)

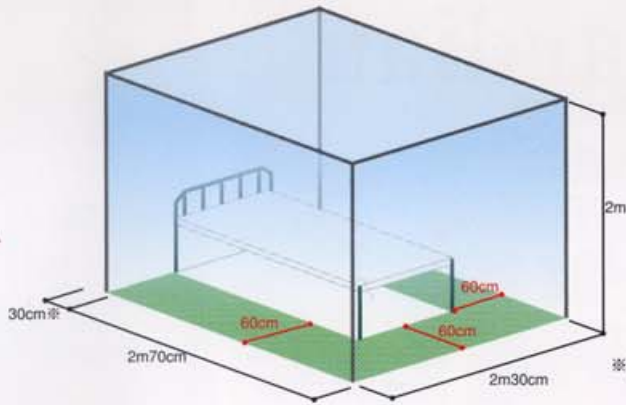

※排気ユニット設置スペース

## ■タイプB (コンパクトタイプ)

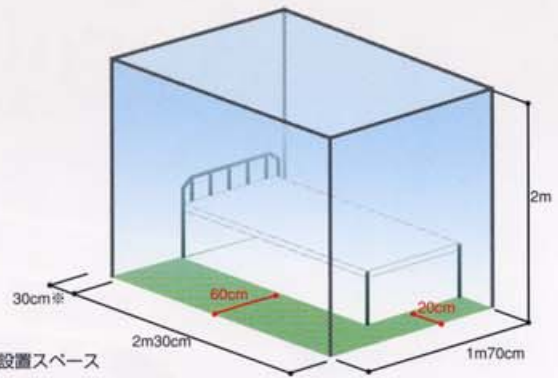

## ■フレームは折りたたみ式です

- 組立て所要時間：20分/2名
- キャスター付きで、移動がスムーズにできます。
- 折りたたみ時のサイズ  
タイプA 幅55cm×長さ2m30cm×高さ1m45cm  
タイプB 幅55cm×長さ1m70cm×高さ1m45cm



## ■簡単なメンテナンス

- テントは使い捨てです。使用後は30分以上排気ユニットを運転してください。内部の空気が完全に入れ替わり、安全に取り扱えます。
- 排気ユニット内部には紫外線ランプが内蔵されています。スイッチオンで内部の殺菌処理を開始します。

## ■仕様

換気回数	タイプA	16回/h	CDCガイドラインに準拠
	タイプB	26回/h	
排気ユニット	本体	幅45cm×奥行27cm×高さ94cm	ステンレス製
	HEPAフィルタ	DOP99.99%	CDCガイドラインに準拠
	紫外線ランプ	殺菌灯 10W×2本	HEPAフィルタおよびユニット内面の殺菌用
	消費電力	50/60Hz：42/49W	
	運転音	40dB (A) 以下	
フレーム	サイズ	上図参照	アルミ製
テント	材質	ポリエチレン製	5枚入り

※CDC：Centers for Disease Control and Prevention (米国疾病管理センター)  
※仕様は改良のため断りなく変更することがありますのでご了承ください。



## 関連商品

### 簡易型採痰ブース

# AeroGuardian Jr. エアロガーディアンジュニア

- 結核症の診断に有用な誘発喀痰の採取を安全におこなえます。
- ブース内は陰圧です。危険な飛沫を逃がしません。
- テントは交換可能です。


## ■仕様

排気ユニット	ステンレス製	幅45cm×奥行27cm×高さ94cm×33kg
	処理風量	180m <sup>3</sup> /h
	HEPAフィルタ	DOP 99.99%
	紫外線ランプ内蔵	HEPAフィルタおよびユニット内面の殺菌用
フレーム	アルミ製	幅90cm×奥行90cm×高さ1m80cm
テント	ポリエチレン製	

※仕様は改良のため断りなく変更することがありますのでご了承ください。



製造元

 **三機工業株式会社**

アメニティシステム部

〒100-8484 東京都千代田区有楽町1-4-1  
TEL.03-3502-6335 FAX.03-3592-5929